

# FemeGyn Hydra®

Ácido hialurónico, Centella asiática, Aloe vera, Glucoproteínas, Alfa-glucooligosacáridos

## Hidratante mucoadhesivo de la zona íntima Ayuda a hidratar y lubricar la sequedad vulvovaginal

La sequedad vaginal es un problema muy habitual entre las mujeres, que ocurre por una disminución de la hidratación natural de la vagina como consecuencia de la reducción de los niveles de estrógenos, de una irritación física o química o por otras alteraciones de la flora vaginal normal. Los síntomas más característicos son la sensación de irritación, el picor, el escozor y el dolor durante las relaciones sexuales.

**FemeGyn Hydra®** es un gel mucoadhesivo no hormonal, con una fórmula innovadora que contiene ácido hialurónico, centella asiática, aloe vera, glucoproteínas y alfa-gluco oligosacáridos, que contribuye a la hidratación y regeneración de la mucosa vaginal, recuperando su elasticidad y flexibilidad.

### ¿Cuándo utilizar FemeGyn Hydra®?

**FemeGyn Hydra®** puede utilizarse siempre que exista sequedad, como ocurre durante la menopausia, el posparto, la lactancia, durante el último periodo del ciclo menstrual, tras una intervención quirúrgica en la zona, en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, por la toma de anticonceptivos orales u otros medicamentos. Otros motivos habituales de sequedad vaginal pueden ser el estrés, la hipersensibilidad a sustancias químicas (jabones no específicos, perfumes, desodorantes) o el uso de ropa interior sintética o ajustada.

### Modo de empleo

Se recomienda una aplicación de **FemeGyn Hydra®** dos veces por semana, pudiéndose utilizar diariamente en caso de necesidad. También puede aplicarse en la zona perineal para mejorar la sequedad vulvar.

### Instrucciones de uso

Lavar las manos antes de su utilización. Con la ayuda del aplicador, introducir 2.5 g de **FemeGyn Hydra®** en el interior de la vagina.


1. Perforar el tubo sellado presionando con el reverso del tapón.



2. Enroscar un aplicador en el tubo.




3. Apretar el tubo para llenar el aplicador con el gel hasta que el émbolo se detenga.

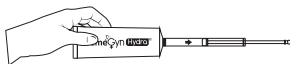

4. Separar el tubo y poner de nuevo el tapón.



5. Para aplicar el gel, acostarse horizontalmente, introducir el extremo del aplicador profundamente en la vagina y empujar lentamente el émbolo.

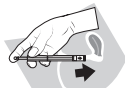

6. Desechar el aplicador.



Compatible con el uso de preservativos. No contiene espermicida y por lo tanto no protege a la mujer del embarazo.

Uso tópico vaginal.

No ingerir.

### Conservación


Mantener en un lugar fresco y seco preferentemente por debajo de 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.


### Ingredientes

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Triethanolamine, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Carbomer, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polyacrylic Acid, Centella Asiatica Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Chitosan, Ethylhexylglycerin, Lactose, Tocopheryl Acetate, Biosaccharide Gum-1, Sodium Hyaluronate, Whey Protein, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

### Presentación

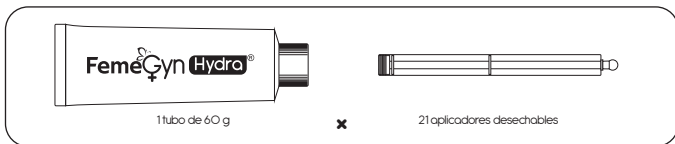

No ingerir

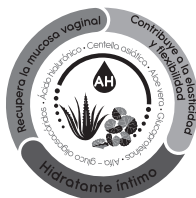

Venta libre.

Fecha de la última revisión de este prospecto: Abril 2023.



www.menarini-ca.com

Fabricado por:  
Laboratoris Feltor S.A.U. - España  
Bajo Licencia de: Kern Pharma, S.L. - España  
Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala

**Atención al consumidor:**  
servicioalcliente@menarini-ca.com

G3786-01